

ベッド・ティルトリクライニング車いす間の移乗

ラクラックス® Uカーブ




移乗がらくらく
凹凸、段差をスムーズに移乗



ベッド・ティルトリクライニング車いす

滑りの仕組み

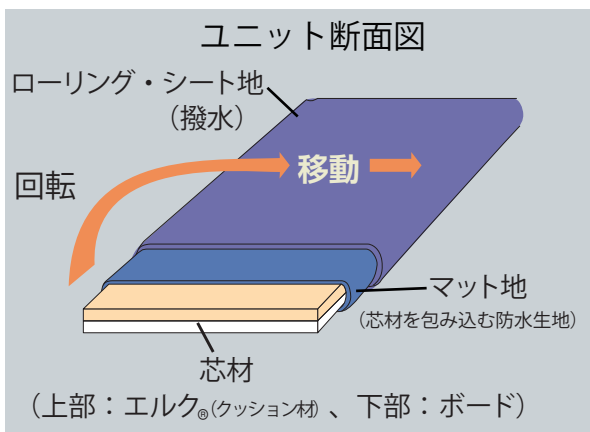


芯材に筒状の生地 (ローリングシート) を包んだ構造で、筒状の生地が芯材の周りを回転します。

身体の下に敷き、滑らせて移乗

1. 移乗する先の形状にフィットする構造で、芯材が **U字型** に曲がるので、**臀部や膝にフィット** します。
2. 移乗先の形状とボードの形状が合わさることで、身体に受ける衝撃などを軽減します。
3. 介護用ベッドと車いすの間にできる隙間をなくし、**頭から膝裏までをサポート** するので、**安全・快適に移乗** できます。
4. ローリングシート部分の表面は撥水加工、マット地部分の表面は防水加工を施しています。

使用例 ベッド→ティルトリクライニング車いす

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>ご利用者の身体半分に差し込みます。</p>	<p>ベッドの高さを車いすに合わせます。</p>	<p>介護者は頭側と足元側から、ご利用者の体重をボード側に傾けながら滑らせます。</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>臀部を車いすの奥に合わせます。</p>	<p>身体の半分に乘っている本体を引き抜きます。</p>	<p>車いす姿勢を確認します。必要に応じて車いすの角度を調整します。</p>

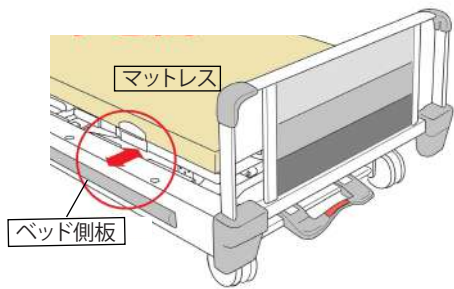

マットレスとベッドの側板の間隙程度であれば、乗り越え可能です。本品を橋渡し状態にして体重を支えることはできませんのでご注意ください。

ラクラックス®Uカーブ

品番：M64RKU10

希望小売価格 (税込) **¥77,000** (税抜) ¥70,000

サイズ：幅 50×長さ 140cm

重量：2.25Kg

材質：ローリング・シート地 / ポリエステル 100%

マット地 / ポリエステル 100%

収納袋 / ポリエステル 100%

芯材上部 (エルク®) / 複合繊維 (ポリエステル) 100%

芯材下部 (ボード) / ポリプロピレン 100%

TAIS：00238-000015

JAN：4531620-400018



使用例

※ 帝人フロンティア独自の防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性にも優れております。

洗濯する場合は右の絵表示の要領をお願い致します。マットの場合、芯材を取り外してお洗い下さい。




発売元 株式会社 ウィズ

〒564-0042

大阪府吹田市穂波町19-25

TEL 06-6310-9090

FAX 06-6310-9600

E-mail with@hello-with.com

http://www.hello-with.com

製造元 株式会社 帝健

お問い合わせ先